


UF Implant NEW

Surface Treatment & Design Feature

UF Implant Surface : **HSA** (Hybrid type SLA)

UF Ø3.8 / Ø4.0 Fixture D3 Ø2.7 drilling / D4 Ø2.0 drilling으로 식립 가능
UF Ø4.5 / Ø5.0 Fixture D3 Ø3.2 drilling / D4 Ø2.7 drilling으로 식립 가능

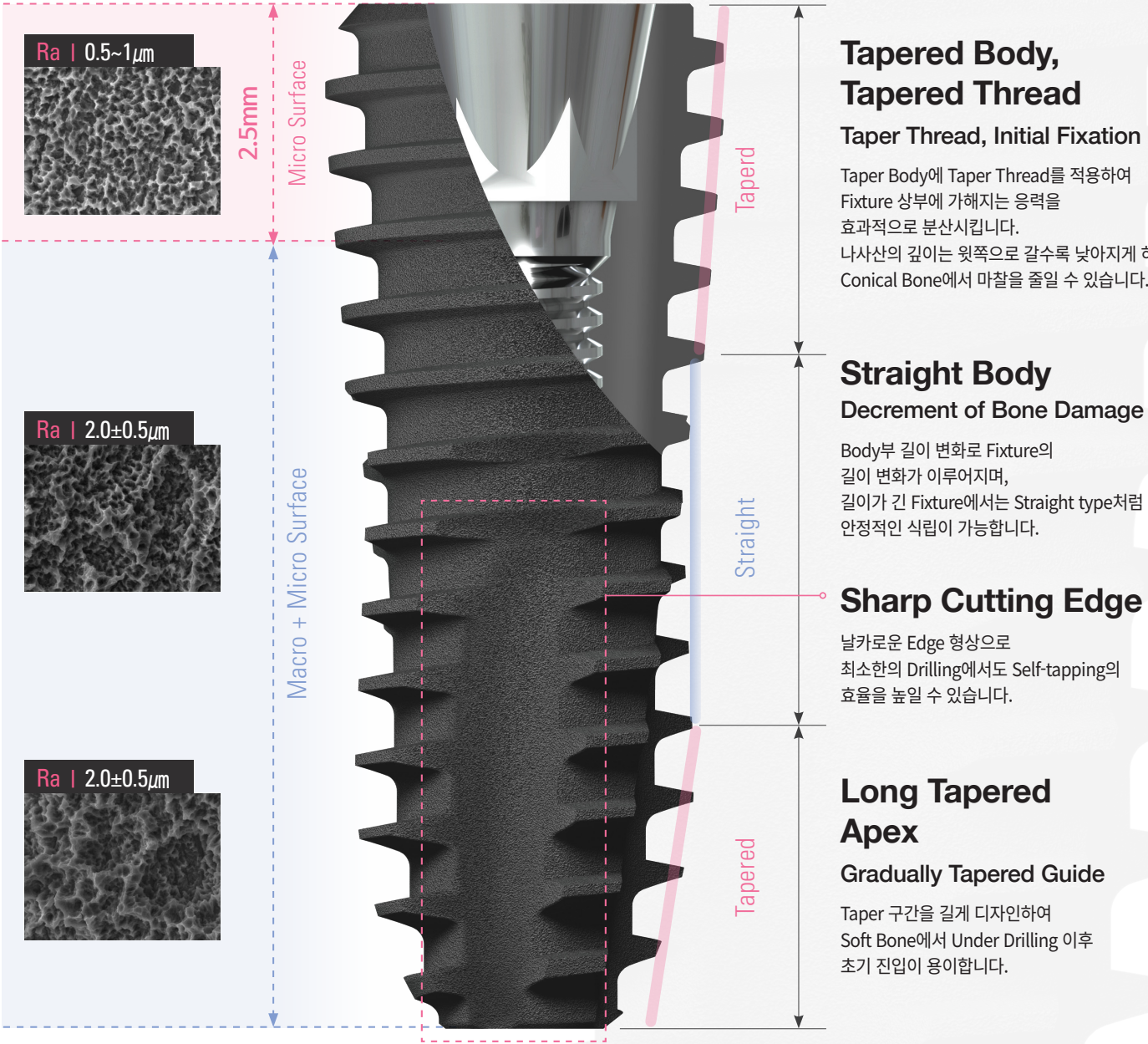

Tapered Body, Tapered Thread

Taper Thread, Initial Fixation

Taper Body에 Taper Thread를 적용하여 Fixture 상부에 가해지는 응력을 효과적으로 분산시킵니다. 나사산의 깊이는 윗쪽으로 갈수록 낮아지게 하여 Conical Bone에서 마찰을 줄일 수 있습니다.

Straight Body

Decrement of Bone Damage

Body부 길이 변화로 Fixture의 길이 변화가 이루어지며, 길이가 긴 Fixture에서는 Straight type처럼 안정적인 식립이 가능합니다.

Sharp Cutting Edge

날카로운 Edge 형상으로 최소한의 Drilling에서도 Self-tapping의 효율을 높일 수 있습니다.

Long Tapered Apex

Gradually Tapered Guide

Taper 구간을 길게 디자인하여 Soft Bone에서 Under Drilling 이후 초기 진입이 용이합니다.

DIO IMPLANT
www.dio.co.kr

디오임플란트 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 66 | 대표번호 051-745-7777 | www.dio.co.kr

서울지점 02-2274-2850	경기지점 031-244-2885	인천지점 032-515-2878	강원지점 033-765-2809
대전지점 042-255-2804	전주지점 063-244-9654	광주지점 062-384-2822	대구지점 053-321-2806
울산지점 052-256-2177	경남지점 055-267-5229	부산지점 051-745-7810	제주지점 055-267-5229

NEW
UF IMPLANT

DIO IMPLANT



NEW

UF IMPLANT


더 경사진 바디와 더 날카로워진 나사선 디자인으로
약한 골질에서 초기 고정력을 안정적이게!

Case 1.
Soft Bone

Case 2.
Sinus Lift

UF Implant NEW 무엇이 특별한가요?

Ø2.7 Under Drilling 후 Ø4.5 Fixture 식립

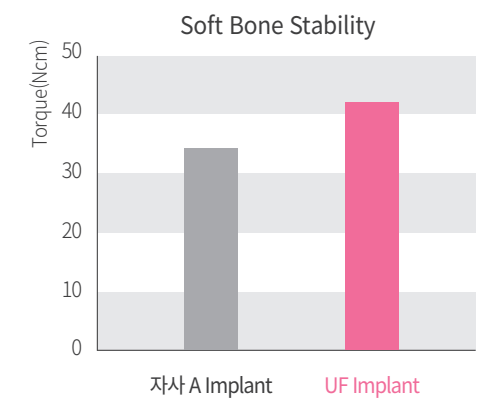

Tapered Shape Body

최적화된 Taper 디자인으로 Soft Bone에서 식립토크 확보가 용이하며 골손실이 적음

Sharp Thread

Soft Bone은 물론, Sinus Case의 잔존골에서도 안정적인 고정력 확보 가능


Sharp Cutting Edge

길고 날카로운 Cutting Edge로 Soft Bone 식립 시 자체 힘으로 파고드는 힘이 높음


UF Implant NEW 임상 Case

Under Drilling을 통해 안정적인 초기 고정력을 확보한 Case

01 상악 Soft Bone Single Case

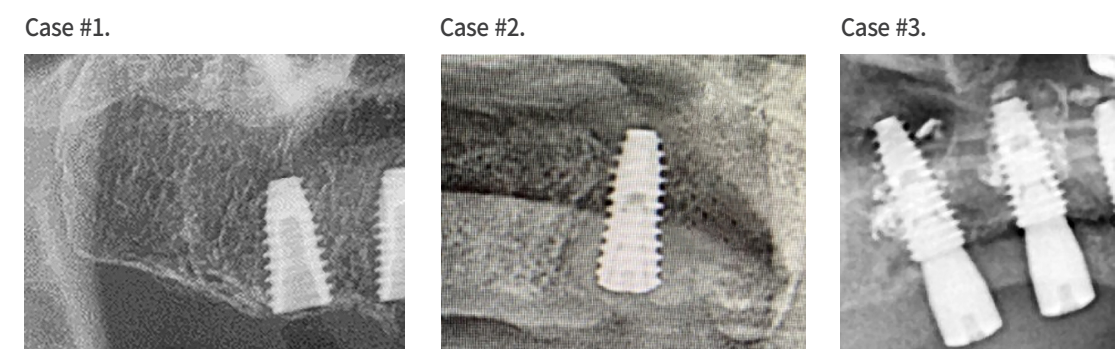

02 하악 Woven Bone Single Case

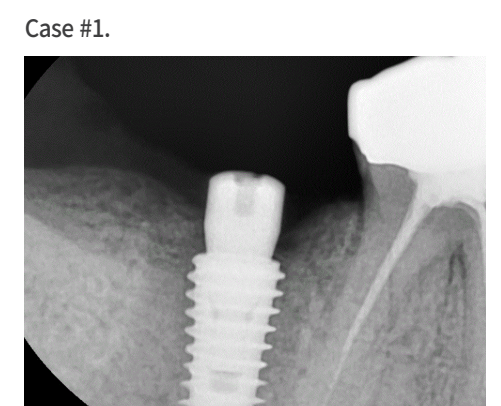

03 상악 Soft Bone Multiple Case



UF Implant NEW Line-up

Regular Fixture [보함 Code I HSA L7502060](#)

- ▶ **UFII 상부 호환**
- HSA / Packing Unit : Fixture I Order code : UF 0000SF (ex : UF 3808SF)
- Fixture + Cover Screw I Order code : UF 0000S (ex : UF 3808S)

Diameter	Ø3.8	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0
Length 7	-	UF 4007SF	UF 4507SF	UF 5007SF
Length 8.5	UF 3808SF	UF 4008SF	UF 4508SF	UF 5008SF
Length 10	UF 3810SF	UF 4010SF	UF 4510SF	UF 5010SF
Length 11.5	UF 3811SF	UF 4011SF	UF 4511SF	UF 5011SF
Length 13	UF 3813SF	UF 4013SF	UF 4513SF	UF 5013SF

UF Implant NEW Drilling Protocol

Ø3.8 UF Fixture

Bone Density	Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile
D1	●	●	●	●				●
D2	●	●	●	●				●
D3	●	●	●					
D4	●	●						

Ø4.0 UF Fixture

Bone Density	Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile
D1	●	●	●	●	●			●
D2	●	●	●	●	●			●
D3	●	●	●					
D4	●	●						

Ø4.5 UF Fixture

Bone Density	Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile
D1	●	●	●	●	●	●		●
D2	●	●	●	●	●	●		●
D3	●	●	●	●	●			
D4	●	●	●					

Ø5.0 UF Fixture

Bone Density	Starter	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3	Profile
D1	●	●	●	●	●	●	●	●
D2	●	●	●	●	●	●	●	●
D3	●	●	●	●	●			
D4	●	●	●					